

Instrukcja obsługi – Wapozon PLUS

model no.: LQ-08

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.

1. Wstęp

Profesjonalny wapozon kosmetyczny. Idealny do pracy w każdym gabinecie kosmetycznym. Lekki, funkcjonalny, ze stabilnym statywem, teleskopowe ramię wyposażone w obrotową główkę. Łatwy w użyciu. Dostępny w białym kolorze. Wapozon posiada funkcję ozonu, który ma właściwości dezynfekujące, poprawia krążenie krwi.

2. Ostrzeżenia i bezpieczeństwo:

Na sprzęt dystrybuowany przez Cosnet udzielana jest dwunastomiesięczna gwarancja. Gwarancja nie obejmuje części podlegających zużyciu oraz części, które mogą zostać uszkodzone na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedostatecznej konserwacji. Bezpieczeństwo produktu jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest on używany prawidłowo i dokładnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem, należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis. Uwaga: podczas stosowania jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, powinny być przestrzegane podstawowe środki ostrożności. Urządzenie nie może być używane i przechowywane w łazience ani innych wilgotnych pomieszczeniach. Nie należy wystawiać na działanie promieniowania słonecznego. W pobliżu urządzenia nie powinny znajdować się inne urządzenia z wysoką temperaturą. Nie należy demonstrować urządzenia. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka i pozostań w kontakcie z autoryzowanym serwisem w przypadku wystąpienia następującej sytuacji: urządzenie miało kontakt z wodą, wydziela dziwny zapach, dym lub hałas, kabel uległ uszkodzeniu, urządzenie upadło i uległo uszkodzeniu. Nie kładź niczego na kablu, nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym ktoś może nadepnąć na kabel. Ze względów bezpieczeństwa należy wyciągnąć kabel z gniazdka nawet gdy urządzenie jest nieużywane. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnej powierzchni, należy unikać jego przewracania i uszkodzeń. Zakupione urządzenie wymaga użycia określonych materiałów i substancji do jego produkcji. Może także zawierać substancje potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i dla zdrowia ludzi w przypadku nieprawidłowego umieszczenia w środowisku.



3. Instrukcja użycia:

1. Urządzenie umieścić na stabilnym podłożu.
2. Następnie sprawdzić czy uszczelka gorącej wody została szczelnie zaciśnięta.
3. Poziom wody należy uzupełniać do momentu aż zbliży się on do wysokiego poziomu.
4. Włączyć urządzenie.
5. Następnie nacisnąć przycisk na panelu obsługi, by nagrzać urządzenie lub nacisnąć przycisk funkcji bakteriobójczej.
6. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć wodę i osuszyć pojemnik.

Uwagi: Gdy urządzenie pracuje, nie należy go przechylać ani przewracać. Nie należy korzystać z urządzenia jeśli nie ma w nim wody. Pojemnik na wodę należy regularnie czyścić. Przed usunięciem pojemnika na wodę należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Specjalnie zaprojektowany dla urządzenia mechanizm powiadomiania: Urządzenie nie będzie rozpryskiwało substancji, ale zaalarmuje w przypadku, gdy jest w nim woda, co oznacza, że mechanizm działa.

Poziom wody jest za wysoki: Odłącz zasilanie, wylej nadmiar wody, włącz ponownie.

Woda jest zbyt mętna: Odłącz zasilanie, wyczyść pojemnik, wymień wodę, włącz ponownie.

4. Parametry techniczne:

- napięcie znamionowe: 220 V/60 Hz
- maksymalna moc: 750 W

Wyprodukowano w Chinach dla:
Cosnet Sp. z o.o. ul. Strachowicka 13c, 54-512 Wrocław
tel. 71 712 03 03; e-mail: sprzedaz@cosnet.pl
www.cosnet.pl